

לקוח יקר,

במסגרת פעילותינו המתמשכת לשיפור נוחות השימוש במשאבות האינסולין של ACCU-CHEK, שיפרנו את מיכל האינסולין.

בחרנו לשדרג את מיכלי האינסולין המתכלים, אשר היו בשימוש עד היום, למיכלים חדשים הכוללים אביזר המסייע במשיכת האינסולין מהבקבוקן בקלות רבה יותר ובפשטות (מצורפות הוראות הפעלה, מתוך חוברת ההדרכה של משאבת האינסולין של Accu-Chek, בצידו האחורי של הדף).  
הפריט החדש בטיחותי ונוח לשימוש והמחט בו אינה חשופה.

להלן מיכל האינסולין הזמין כעת בקופות החולים:



בהזדמנות זו, אנו מבקשים מכם לוודא בכל החלפת סוללה במשאבת האינסולין שהתאריך והשעה במשאבה מעודכנים.

לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות הזמין עבורכם 24/7 בטלפון: 04-6175394.

אתם מוזמנים לבקר באתר החדש שלנו, להצטרף למועדון הלקוחות ולהתעדכן במבצעים וחדשות:

[www.dyndiabetes.co.il](http://www.dyndiabetes.co.il)



הצטרפו אלינו **Accu-Chek Israel**

# הוראות להחלפת מיכל אינסולין

1.



רחץ את ידיך.

2.



הכן את בקבוקון האינסולין ואת מיכל המילוי (מזרק).

3.



הוצא את המכל מהאריזה. משוך את המוט עד לקצה המיכל.

4.



חבר את המיכל אל הבקבוקון עד השמע קליק.

5.



הפוך את המיכל עם הבקבוקון ודחוף את המוט פנימה.

6.



שחרר לאט את מוט המזרק כדי שהאינסולין ייכנס אל המיכל. במידת הצורך משוך את המוט עד למילוי מלא מיכל.

7.



היפטר מבועות האוויר על ידי הקשה על מיכל האינסולין, ודחיפת המוט חזרה אל הבקבוקון. לאחר מכן משוך את המוט חזרה מטה למילוי מלא.

8.



הברג החוצה את מוט המיכל.

9.



נתק את מיכל האינסולין מהמכסה הכחול ע"י סיבוב ומשיכה.

