

דוקרן Accu-Chek® Softclix

טכנולוגיה מוכחת למזעור תחושת הכאב.*

הדוקרן הקלאסי המשלב קלות ופשטות בכל הפעלה.

הכנת הדוקרן



חברו מחדש את הראש



הסירו את כיסוי המחט



הכניסו את המחט



נתקו את הראש

בחירת עומק הדקירה



בחרו מתוך 11 אפשרויות

ביצוע הדקירה



לחצו על הלחצן הצהוב לשחרור



לחצו על הלחצן לטעינה

החלפת מחט



חברו מחדש את הראש.



סובבו את מכסה המחט.



הכניסו מחט חדשה.



נתקו את הראש. הוציאו את המחט.



המפתח למזעור תחושת כאב הוא בטכנולוגיית Clixmotion שימוש בפטנט עיקרון התנועה הדו-כוונית. הבטחה לתנועה מדויקת ללא תנודות. בזכות החיתוך המיוחד של המחט מושגת בדיקה עדינה ביותר.

* בהשוואה למותגים אחרים.¹

1. Kocher S., Tshiang Tshiananga J.K., Koubek R. Comparison of Lancing Devices for Self-Monitoring of Blood Glucose Regarding Lancing Pain. Journal of Diabetes Science and Technology; September 2009 Volume 3, Issue 5: 1136-1143.

5 טיפים לביצוע בדיקה עדינה.

בדיקה נכונה עם דוקרן Accu-Chek תוריד עד למנימום את תחושת חוסר הנוחות.
5 טיפים שיעזרו לך לבדיקה נוחה וטובה יותר.

הקפידו על ידיים נקיות ויבשות.



הצמידו את הדוקרן לצד האצבע ולא לכרית.



הקפידו שהעור יהיה מתוח בעת הצמדת הדוקרן.



בחרו עומק חדירה קטן ככל האפשר,
אך שעדיין מאפשר הוצאת דגימה.



החליפו בין האצבעות מדי יום.
במידת הצורך ניתן גם לבדוק באזורים חלופיים.



מומלץ להחליף את המחט
לאחר כל דקירה.
בשימוש תכוף, המחט תאבד
מחדותה והכאב יגבר.

את דוקרן Accu-Chek Softclix ניתן למצוא במגוון מדי הסוכר של Accu-Chek

בטוח. חופשי מדאגות.
תוצאה מהירה ב-5 שניות.
בקרת איכות חכמה.
טיפת דם זעירה.
התראה על מקלון פגום.

הצטרפו אלינו: F Accu-Chek Israel
למידע נוסף www.accu-chek.co.il
www.dyn.co.il

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and CLIXMOTION are trademarks of Roche.
© 2010 Roche Diagnostics

www.accu-chek.com
Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
D-68305 Mannheim



ACCU-CHEK®