

# מד סוכר מדבר i-QARE DS-E




מד סוכר מדבר i-QARE DS-E מותאם במיוחד לכבדי ראייה ומשלב פשטות בהפעלה יחד עם הנחייה קולית וקריאת תוצאות הבדיקה בשפה העברית והערבית על פי בחירת המשתמש.

## מה בערכה?

- מנשא פלסטיק קשיח עם סימון בולט באזור פתיחת הקופסה.
- מד סוכר מדבר i-QARE DS-E.
- דוקרן לבדיקת סוכר.
- דף הוראות.

## הכנה לפני בדיקת הסוכר בדם

1. פתחו קופסת מקלונים חדשה. בכל קופסת מקלונים נמצא כרטיס מקודד.
2. הכניסו את המקודד בפתח הכנסת מקלון הבדיקה במד הסוכר.
3. וודאו שהקוד המופיע תואם לקוד המופיע על קופסת המקלונים.
4. הוציאו את המקודד.
5. כבו את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור הפעלה שנמצא בצד ימין של מד הסוכר.

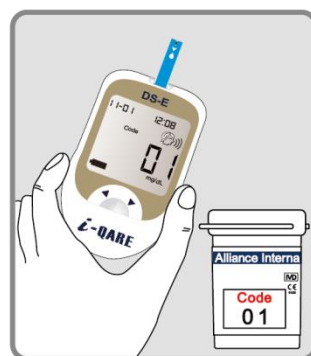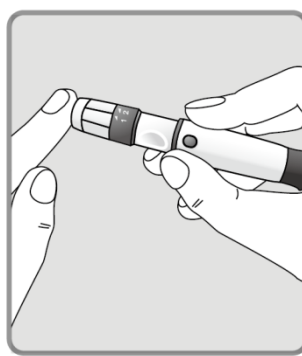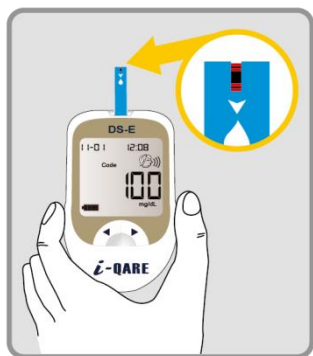

## ביצוע הבדיקה

1. הכניסו את מקלון הבדיקה אל מד הסוכר.
2. בעת הופעת איור מהבהב של מקלון הבדיקה תתקבל התראה קולית "לפני האורחה יש לבדוק את ערכי הסוכר בדם" – כעת מד הסוכר מוכן לבדיקת הסוכר בדם.
3. בצעו דקירה בקצה האצבע עם הדוקרן.
4. את דגימת הדם הצמידו לקצה המקלון, הדם ישאב אל המקלון במהירות.
5. תוצאת בדיקת הסוכר תתקבל כעבור כ-7 שניות.
6. התוצאה תופיע הן על המסך וגם בחיווי קולי (2 חיוויים).
7. התוצאה נשמרת בזכרון המכשיר.

## הגדרת תאריך ושעה

1. לחצו לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה עד שהמכשיר יידלק.
  2. נווטו עם החצים ימינה או שמאלה עד אשר תופיע המילה SET.
  3. לחצו על כפתור הפעלה לכניסה לתוך התפריט.
- **הגדרת שנה** – בחרו עם החצים את השנה הנכונה ולחצו על כפתור הפעלה.
  - **הגדרת חודש** – בחרו עם החצים את החוד ולחצו על כפתור הפעלה.
  - **הגדרת יום בחודש** – בחרו עם החצים את היום ולחצו על כפתור הפעלה.
  - **הגדרת שעות 24** – בחרו את התצוגה הרצויה ולחצו על כפתור הפעלה.
  - **הגדרת שעה** – בחרו עם החצים את השעה ובסיום לחצו על כפתור הפעלה.
  - **הגדרת דקות** - בחרו עם החצים את הדקות.

סיימנו את כיוון השעה והתאריך << לחצו על כפתור ההפעלה לחיצה ארוכה.

## הגדרת שפה

1. כאשר מד הסוכר כבוי, לחצו על כפתור ההפעלה לחיצה ארוכה עד שמד הסוכר יידלק.
2. בחרו עם החצים "הגדרת שפה" יופיע אייקון של ראש.
3. לחצו על כפתור הפעלה לכניסה לתוך התפריט.
4. בחרו עם החצים את השפה הרצויה.

- 2 – לשפה העברית
- 1 – לשפה הערבית

סיימנו את הגדרת השפה << לחצו על כפתור ההפעלה לחיצה ארוכה.

