

5 עצות לבדיקה נכונה

בדיקה נכונה בעזרת הדוקרן *ACCU-CHEK® Softclix* ממזערת את תחושת הכאב ומסייעת בקבלת תוצאה אמינה ומדויקת.

וודאו שהידיים נקיות ויבשות.



דקרו את קצה האצבע בצד ולא בכרית האצבע.



הצמידו את הדוקרן לאצבע.



בחרו בעומק חדירה נמוך ככול האפשר.



החליפו את האצבעות לסירוגין.



1. המחטים מצופות בסיליקון הגורם לחדירה חלקה, אשר נשחק לאחר מספר דקירות.
2. בשימוש חוזר המחטים מאבדות מהחדות המיטבית שלהן.
3. בשימוש חוזר המחטים עלולות להזדהם.

* לכן יש להחליף בכל יום בסיום הבדיקות למחט חדשה.

